



Info patient “distracteur smile”

La partie centrale du distracteur a quatre petits trous qui sont marqués avec 4 couleurs différentes. Le module est activé deux fois par jour, d'une couleur à une autre.

La pointe du patient key est introduite au milieu du distracteur ensuite vous poussez la clé légèrement en bas et en arrière. Votre chirurgien ou orthodontiste vous montrera la première fois devant un miroir.

Chaque matin et soir vous tournez le distracteur d'un quart ou 0,25mm par tournant. Après 10 jours d'activité vous pouvez envisager une ouverture de 5mm entre les deux dents frontales.

Pendant cette période d'expansion il est important que:

- le distracteur reste tout le temps sous tension.

- l'ouverture entre les deux dents frontales s'agrandit tous les jours

Dès que l'expansion souhaitée est atteinte le médecin introduira la vis de blockage pour stabiliser le distracteur.


Il est important que le module reste fixe et immobile pendant une période de 3 à 5 mois. Au cas où le distracteur se détacherait il est nécessaire de venir en consultation afin de le serrer.

Prenez soin de votre distracteur et nettoyez le quotidiennement avec une petite brosse à dents douce.



Activation

Introduisez la pointe dans le petit trou. Rotez la clé Patient en arrière.

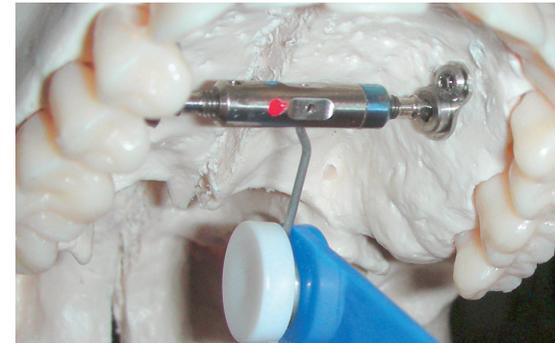

Tournez un quart jusqu'au suivant trou est visible – ceci 2x par jour.



Avant expansion.



Distracteur smile actif.



6 mois après expansion

